

ES


Soloc Buckle- SBuck



### Advertencias

- La hebilla Soloc está diseñada para utilizarse como parte de un cinturón abdominal de silla de ruedas. Usted ha elegido adquirir la hebilla individualmente, por lo que asume la responsabilidad de asegurarse de que el cinturón cumpla los requisitos de seguridad.
- El hebilla Soloc está diseñado únicamente para el posicionamiento postural y/o la seguridad, no como método de sujeción.
- **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA** debe utilizarse el hebilla Soloc como único método de sujeción del Usuario en una silla de ruedas, durante el transporte en un vehículo de motor. Cuando se transporte a un ocupante en silla de ruedas, en un vehículo de movilidad, debe utilizarse un sistema adecuado de sujeción de 4 puntos (WTORS) con un sistema adecuado e independiente de sujeción del pasajero de 3 puntos para garantizar la seguridad del ocupante durante el transporte.
- Este hebilla Soloc debe ser prescrito e instalado por un profesional sanitario debidamente cualificado, prestando la atención necesaria a la colocación, el recorrido de las correas y el ajuste correcto. El cinturón solo debe ser utilizado por el usuario para el que ha sido instalado.
- El hebilla Soloc está destinado a un solo ocupante cuya masa no supere los 100 kg.
- No modifique ni manipule de ningún modo la hebilla.
- Recomendamos que se compruebe el funcionamiento del hebilla antes de utilizarlo
- La hebilla utiliza campos magnéticos para enganchar y atraer las piezas entre sí. Asegúrese de que ello no afecte a los dispositivos sensibles a los campos magnéticos. La hebilla debe colocarse a una distancia mínima de 50 mm de un marcapasos u otro dispositivo electrónico.
- Por favor, anote el número de lote del embalaje en sus registros de usuario para su trazabilidad.

### Identificación de piezas

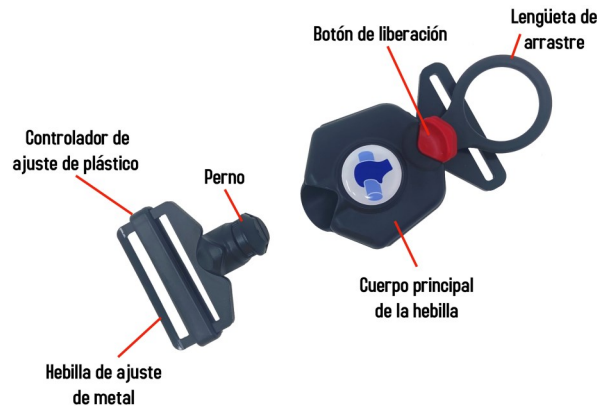

### Cómo operar la hebilla

Para cerrar la hebilla, simplemente coloque el perno cerca del cuerpo principal de la hebilla. Los imanes del interior ayudarán a cerrarla. Tenga en cuenta que al cerrar se realiza una conexión física; los imanes solo ayudan a conectar el cinturón.

La lengüeta roja de liberación debe haber retrocedido desde la posición de liberación para que la hebilla quede asegurada. No debe haber ningún espacio entre la lengüeta roja de liberación y la hebilla.

Para abrir la hebilla, presione el botón de liberación o tire de la lengüeta de arrastre.

Para garantizar el correcto funcionamiento de esta hebilla, existen limitaciones en cuanto al grosor del cinturón que puede utilizarse de forma segura con la hebilla Soloc. El grosor del material del cinturón que debe utilizarse oscila entre 1,1 mm y 1,3 mm. Las ranuras están diseñadas para correas de 50 mm de ancho.

ES

Soloc Buckle- SBuck



### Información para el usuario/cuidador - Léala antes de usar el producto

- Se recomienda la inspección diaria del cinturón. Si detecta algún defecto, NO utilice y póngase en contacto con el fabricante.
- La hebilla de cincha pueden limpiarse con un paño húmedo con un detergente suave y agua tibia. No lavar a máquina. No sumergir la hebilla en agua. Si entra agua u otro líquido en el cuerpo principal o en las partes de los pernos de la hebilla, déjelo escurrir y secar durante 24 horas en un lugar cálido y ventilado. Tenga en cuenta que, si bien el agua externa puede secarse rápidamente, los compartimentos internos de la unidad tardarán más tiempo en secarse.
- Se recomienda realizar una inspección antes de utilizar el producto para garantizar que la función de la hebilla funciona correctamente. Compruebe que el botón de apertura/la lengüeta de arrastre se abre y se cierra sin obstrucciones y que la unidad se cierra sin necesidad de aplicar fuerza adicional. Cambie la posición de la hebilla si la lengüeta se engancha en el acolchado.
- Asegúrese de que el perno entre en la unidad principal sin ejercer una fuerza excesiva. La conexión de las dos unidades está asistida por imanes internos, por lo que no se requiere fuerza adicional una vez que se unen las dos partes. Si los imanes no juntan las piezas de la hebilla, compruebe que no se hayan acumulado residuos en el interior de la abertura del cuerpo, y compruebe el perno para ver si hay suciedad en el extremo del producto que pueda restringir la conexión de la unidad. Para eliminar cualquier residuo, limpie el perno con un paño o utilice una herramienta suave, como un bastoncillo de algodón, para eliminar los restos atrapados en el punto de entrada del perno en la hebilla.

The Active Hands Company - Unit 4, Rumbush Farm Business Park,  
322A Rumbush Lane, Earlswood, Solihull B94 5LW, UK

tel.: +44 (0)1564 702 255

correo electrónico: [soloc@activehands.com](mailto:soloc@activehands.com)

[www.activehands.com](http://www.activehands.com)

Testado según: ISO 9001  
ISO 16840-3  
ISO 16840-10

