

Regolazioni

Dal momento che la posizione e la tensione della cintura pelvica sono estremamente importanti per un uso corretto, è bene assicurarsi che tutti i cinghioi siano regolati in modo adeguato e usare un'imbottitura.

Se la cintura è troppo stretta, può causare all'utilizzatore un inutile fastidio o disagio. Se, invece, è troppo larga, può girarsi in avanti o indietro e non servire all'uso previsto. Se la cintura è messa male, la leva di sgancio può entrare in contatto con una parte rigida dell'abbigliamento (ad es., un grosso bottone o la fibbia di una cintura) o incastrarsi nell'imbottitura e azionarsi accidentalmente aprendo la fibbia. Se l'utilizzatore mostra continui segni di fastidio o disagio a causa della cintura Connect, è bene consultare immediatamente un operatore sanitario qualificato.

Informazioni Utilizzatore / Assistente - Leggere prima dell'uso

- Le cinghie o le imbracature sono i primi elementi da allacciare appena l'utilizzatore è seduto sulla carrozzina e gli ultimi da aprire o togliere prima che si alzi. Non muovere la carrozzina con la cintura sganciata perché può incastrarsi nelle ruote e rovinarsi.
- Si raccomanda di ispezionare la cintura ogni giorno. Se si notano dei difetti, NON usarla e contattare il produttore.
- Può essere necessario regolare la lunghezza della cintura Connect per adeguarla alla crescita dell'utilizzatore, a eventuali cambiamenti nella sua disabilità o all'abbigliamento usato in base alla stagione. È possibile usare la fibbia principale per fare piccole regolazioni e le piastre di montaggio alla carrozzina per regolazioni più importanti.
- Se la cintura non è regolata bene può causare fastidi e fare male. Si raccomanda di controllare se l'utilizzatore mostra segni, arrossamenti, lividi o ferite nelle zone del corpo a contatto con la cintura.
- La fibbia Soloc e le cinghie possono essere pulite con un panno umido, un detergente delicato e dell'acqua tiepida. Non lavare in lavatrice. Non immergere in acqua. Se nel corpo principale della fibbia o nel perno entra dell'acqua, farla sgocciolare e lasciare la parte ad asciugare per 24 ore in un luogo ventilato. È bene notare che l'esterno può asciugare velocemente ma l'interno impiegherà più tempo.
- L'imbottitura amovibile può essere lavata in lavatrice a 40 °C con un programma per capi sintetici.
- Si raccomanda di ispezionare la fibbia Soloc prima dell'uso per verificare se funziona correttamente. Controllare se il pulsante e l'anello di sgancio si aprono e si chiudono senza problemi e se l'unità si chiude senza fare più forza del necessario. Sistemare la fibbia se l'anello di sgancio tocca l'imbottitura.
- Controllare se il perno entra nell'unità principale senza fare troppa forza. Una volta avvicinate le due parti, le calamite interne favoriscono l'aggancio. In caso contrario, non fare forza: controllare se dentro l'apertura e sul perno c'è dello sporco. Per toglierlo, passare il perno con un panno e usare un oggetto morbido, come un bastoncino di cotone, per pulire il buco nella fibbia.

The Active Hands Company - Unit 4, Rumbush Farm Business Park, 322A
Rumbush Lane, Earlswood, Solihull B94 5LW, UK

Tel: +44 (0)1564 702 255

E-mail: soloc@activehands.com

www.activehands.com

Testato per:
ISO 9001
ISO 16840-3
ISO 16840-10



Avvertenze

- La cintura Connect è progettata esclusivamente per mantenere una postura sicura, non come metodo di ritenuta.
- IN NESSUN CASO deve essere usata come unico metodo per assicurare una persona a una carrozzina durante il trasporto in un veicolo a motore. Quando si trasporta una persona in carrozzina con un veicolo, è obbligatorio usare un adeguato sistema di contenimento del passeggero e di fissaggio della carrozzina (WTORS) a quattro punti insieme a un adeguato sistema di ritenuta del passeggero a tre punti per garantire un viaggio in sicurezza.
- La cintura Connect deve essere prescritta e montata da un operatore sanitario qualificato, che deve verificare se è posizionata correttamente e se la cinghia passa nel punto giusto ed è regolata bene. La cintura deve essere usata solo dalla persona per la quale è stata preparata.
- È fondamentale che abbia la giusta tensione (v. sezione Regolazioni).
- La cintura Connect con fibbia Soloc è studiata per un solo occupante di peso inferiore a 100 kg.
- Non modificare né alterare in nessun modo la cintura o la fibbia.
- Prima dell'uso, raccomandiamo di controllare il corretto funzionamento della cintura (v. la sezione Informazioni per l'Utilizzatore / l'Assistente).
- Il perno si aggancia alla fibbia grazie a delle calamite. Pertanto, è bene assicurarsi che non si creino interferenze con eventuali dispositivi sensibili ai campi magnetici. La fibbia deve trovarsi ad almeno 50 mm da un pacemaker o altro dispositivo elettronico.
- Consigliamo conservare il numero di lotto indicato sull'imballaggio tra i documenti della cintura per riferimento futuro.

Parti



Come usare la fibbia Soloc

Per chiudere la fibbia Soloc, basta avvicinare il perno al corpo principale. La chiusura comporta un aggancio fisico: le calamite aiutano solo a completare l'operazione.

Per garantire il corretto funzionamento della fibbia Soloc, la cintura deve avere uno spessore specifico, e cioè tra 1,1 e 1,3 mm. Le fessure sono studiate per cinghie larghe 50 mm.

Per aprire la fibbia, premere il pulsante di sgancio o tirare l'anello.

IT

Soloc Connect - SCon

Manuale d'uso



Come regolare la cintura

La cintura Connect può essere regolata su misura usando l'anello a D, nel quale è possibile infilare un dito o due, per fare dei piccoli aggiustamenti in base agli abiti indossati. La cintura deve essere montata in modo da richiedere solo una minima regolazione.

Per allungarla, tirare il perno sganciato in direzione opposta al corpo in modo da far scorrere la cinghia nella fibbia di regolazione in metallo.

Come mettere l'imbottitura (opzionale)

La cintura Connect può essere acquistata con una doppia imbottitura: una manica semplice che si infila sul lato con il perno e una manica con una parte piatta da mettere sotto la fibbia. L'imbottitura deve essere infilata sulla cintura prima di fissarla alla sedia a rotelle.

Imbottitura lato fibbia: la fibbia Soloc si fissa all'imbottitura grazie all'apposito velcro. Assicurarsi di averla posizionata in modo che l'anello di sgancio non rimanga impigliato. La fibbia si deve aprire e chiudere liberamente. In caso contrario, la cintura può rimanere aperta e l'utilizzatore può farsi male. Se l'anello rimane impigliato, allontanare la fibbia dal bordo dell'imbottitura e tirare di più l'imbottitura verso il lato opposto.

L'imbottitura deve coprire tutta l'area a contatto con il corpo. A questo scopo, è disponibile in due lunghezze diverse (600 e 800 mm).

Montare la cintura Connect sulla carrozzina

Raccomandiamo di far montare la cintura da un professionista esperto. In ogni caso, assicurarsi di avere prima ottenuto l'autorizzazione del proprietario della carrozzina.

Prima di tutto, bisogna stabilire la posizione più indicata per la cintura Connect in base alla disabilità dell'utilizzatore e al tipo di carrozzina. Si raccomanda di prendere le misure giuste con l'utilizzatore seduto sulla carrozzina e la cintura nella posizione prevista.

La lunghezza della cintura può essere regolata usando la piastra Tri-Plate. La parte pendente può essere infilata nella fibbia Tri-Glide per farla rimanere in ordine.

Fig 1



Fig 2



A questo punto, far passare la cintura nella fibbia Tri-Glide infilandola nelle due asole, prima da sotto e poi da sopra (Fig. 1), e regolare la lunghezza della cintura in base all'utilizzatore. Poi inserire la cintura nell'asola più esterna della piastra Tri-Plate, quindi nell'asola centrale (Fig. 2) e infine in quella più interna (Fig. 3). La cintura può essere infilata di nuovo nella prima asola (Fig. 4). Una volta ben stretta, rimarrà saldamente al suo posto. L'estremità della cintura può essere infilata nella fibbia Tri-Glide per non farla pendere ed evitare così che si incastrino nelle ruote della carrozzina.

Fig 3



Fig 4



La cintura Connect è fornita di serie con una piastra a tre asole (Tri-Plate), i relativi bulloni e le rondelle, per fissarla alla carrozzina. Se la carrozzina ha già dei fori nel telaio, è possibile agganciare la piastra usando i bulloni forniti.

Su Active Hands, è disponibile una staffa che si aggancia alla piastra per fissare la cintura Connect al telaio della carrozzina.

IT

Soloc Connect - SCon

Manuale d'uso



Montare la cintura Connect sulla carrozzina cont.

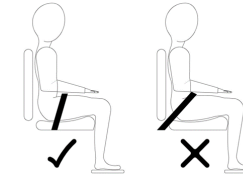


Fig 1



Fig 2

Per usare la staffa, infilare l'estremità curva nell'asola della piastra (Fig. 1) fino a metterla bene in posizione (Fig. 2). Mettere il gommino di protezione sul telaio, nel punto in cui verrà agganciata la cintura. Appoggiare la staffa al gommino e stringere bene il bullone.



La cintura deve impedire al bacino di scivolare in avanti. A questo scopo, deve essere agganciata in modo da passare davanti ai grandi trocanteri come mostrato nella figura a sinistra.

Maggiori informazioni sull'aggancio e sulla posizione del supporto posturale sono disponibili nello standard BS 8625:2019

Mettere la fibbia Soloc sulla cintura

La cintura viene fornita con la fibbia già montata. Se bisogna cambiarla, o toglierla per pulirla, può essere rimontata come segue.

L'estremità della cinghia dove si trova la fibbia è cucita: lasciarla così com'è.

L'altra estremità, cioè dove si trova il perno, è regolabile e ha una fibbia in metallo con una traversa in plastica. Inserire la cinghia da sotto nella prima asola (più lontana dal perno), farla passare sopra la traversa in plastica e inserirla nella seconda asola (più vicina al perno). Tirare la cintura finché l'anello a D non tocca la fibbia di metallo. Assicurarsi che il perno sia orientato con la V verso l'alto.

Per assicurare il corretto funzionamento della fibbia Soloc, la cintura deve avere uno spessore compreso tra 1,1 e 1,3 mm.



Sicura Houdini

Ogni fibbia Soloc è dotata di una sicura Houdini che permette, se serve, di bloccare l'unità in modo che l'utilizzatore non possa aprirla da solo.

La fibbia può essere bloccata inserendo sotto l'adesivo con il logo una vite che impedisce al pulsante o all'anello di sgancio di funzionare.

Per liberare un utilizzatore dalla cintura, è necessario mettere sulla fibbia il dispositivo di sgancio Houdini, che grazie a dei magneti in punti strategici sblocca il meccanismo interno. Questo sistema è più sicuro di altri e non può essere manomesso né sbloccato con strumenti diversi da quello previsto.

Assicurarsi di avere a portata di mano il dispositivo di sgancio Houdini in caso di emergenza. Può essere tenuto sullo schienale della carrozzina (fuori dalla portata dell'utilizzatore) o portato dall'assistente.